



ELETTRONICA
PAGANI
ITALY

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
[www.righetto .biz](http://www.righetto.biz)

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
[www.righetto .biz](http://www.righetto.biz)



LUXURY CONCEPT
IN FISIOTERAPIA



Passione LA FORZA DELLA PASSIONE

Con la linea **S T A R**, PAGANI segna un nuovo e decisivo passo avanti, con una gamma dotata di una serie di prerogative che la fanno il nuovo e vero punto di riferimento per tutti i professionisti del settore.

S T A R offre infatti prestazioni che possiamo definire "THE LUXURY CONCEPT" e senza alcun compromesso; ancora più efficacia, ancora più versatilità, ancora più controllo, ancora più innovazione. **S T A R** è un concetto di prestazioni elevate per professionisti che amano il proprio lavoro e che desiderano sempre il massimo per se stessi e per i propri pazienti.

Per chi come PAGANI non si stanca mai di cercare nuove soluzioni, di rendere concrete le idee creative e le conoscenze, **S T A R** è ancora una volta il risultato della passione.

Il vero spirito di PAGANI

S T A R incarna lo spirito duraturo, innovativo e infinitamente progressista di PAGANI e fa parte di una storia che risale ad oltre 70 anni orsono.

La spinta di PAGANI verso l'innovazione e la passione per la tecnologia e tutto ciò che è «HEALTHCARE» hanno reso possibile il suo successo nel mondo intero.

Design by
Studio Carozzi - Milan
Golden Compass Award



Italian Design IL DESIGN CHE PARLA ITALIANO

Quando si parla di linguaggio del design, **S T A R** rappresenta il meglio dell'Italian Style in materia di Industrial Designer.

PAGANI si è affidata ad uno dei più noti designers del settore, con un'ampia esperienza che è stata trasferita e riassunta in un dispositivo altamente professionale.

E da qualsiasi punto di osservazione, i messaggi della qualità sono chiari e convincenti.

Punti salienti visivi e funzionali includono un razionale e scolpito

pannello frontale con led blu lungo il perimetro, che ne mette in risalto la cura dei particolari, la novità delle forme, la razionalità dell'intero sistema che esprime nel suo complesso professionalità e affidabilità. **S T A R** è la bellezza mistica del design «made in Italy» in cui si compendiano linee moderne curate ed uso della tecnologia per un prodotto raffinato e scientificamente avanzato.

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz



Tecnologia TOUCH CONTROL PLUS

Il "PAGANI TOUCH Control Plus" è posizionato nella parte superiore di **S T A R**.

Si tratta di un grande touch-screen interattivo attraverso il quale l'operatore può accedere ad ogni funzione del dispositivo.

Con un'interfaccia altamente reattiva, TOUCH Control Plus è progettato per aiutare l'operatore a mantenere l'attenzione sull'applicazione in corso, gestendo ogni parametro in modo facile ed intuitivo.

Voice assistant e connessioni esterne

Il sistema incorpora il «PAGANI Voice Assistant» per aiutare l'operatore nella scelta e selezione di tutte le funzioni. In pratica, alla selezione di ciascuna funzione corrisponde la ripetizione vocale della medesima selezione.

La disponibilità di uscite esterne per connessioni a chiave USB e scheda SD, consente un dialogo sempre aperto tra il vostro dispositivo **S T A R** ed il mondo esterno, per aggiornamenti, per l'inserimento di immagini, foto, per estrapolare informazioni.

Informazioni e video tutorial

Per ogni tipo di trattamento è disponibile attraverso il tasto **INFO** una breve ed utile descrizione di come eseguirlo. Sul vostro TOUCH Control Plus appaiono due funzioni di tutorial: la prima funzione è costituita da un tasto **INFO** a cui l'operatore può accedere per ricevere informazioni, vocali e scritte, circa le modalità ed i fini del trattamento selezionato; la seconda consente di attivare un video che illustra come eseguire il trattamento.



Fisioterapia 4.0 INTERCONNESSIONE E TELECONTROLLO

S T A R è la gamma attualmente più innovativa del settore Medico Fisioterapico, costituita da dispositivi altamente tecnologici ed "aperti" al mondo esterno, in grado di offrire interconnessione e telecontrollo a distanza.

Una serie di sensori sono in grado di migliorare e tenere sotto controllo costantemente le performances terapeutiche, garantire la sicurezza operativa, monitorare di continuo le funzioni principali del dispositivo. Il sistema di Controllo Logico Programmabile è in grado di identificare ciascun trattamento, gestire i pazienti, le performances terapeutiche, i risultati ottenuti, interfacciabile con i sistemi informatici di ciascun Cliente mediante la sua rete internet. Ciascun dispositivo della gamma **S T A R** è in grado di interfacciarsi all'esterno con il la fabbrica per garantire il monitoraggio delle funzioni, l'assistenza da remoto ed eventuali aggiornamenti sempre da remoto.



DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
 VENEZIA
 tel.0415415253
 www.righetto.biz

Controllo Totale

LA TUA MEMORIA VIRTUALE


Oltre all'impostazione manuale, **S T A R** permette all'operatore di scegliere tra tre diverse modalità funzionali:

- 1- Ampia libreria di programmi predefiniti
- 2- Memorie libere
- 3- Data-base pazienti con dati anagrafici e terapeutici.


Accedendo al Data-base pazienti è possibile inserire i dati anamnestici e terapeutici del paziente, sia in fase di ingresso e prima visita, sia in fase di uscita, al termine del ciclo terapeutico.

La gestione dei dati del paziente garantisce all'operatore di disporre in ogni momento di elementi oggettivi da consultare, da fornire al paziente.

STAR software interface showing patient data entry fields. The interface includes a sidebar with a calendar view (Day 1 to Day 5) and a main area with fields for Name, Surname, Age, Sex, and various treatment parameters like Intensity, Frequency, and Duration. There are also buttons for 'OK', 'Cancel', and 'Print'.

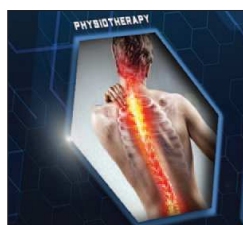

STAR software interface showing patient data entry fields. The interface includes a sidebar with a calendar view (Day 1 to Day 5) and a main area with fields for Name, Surname, Age, Sex, and various treatment parameters like Intensity, Frequency, and Duration. There are also buttons for 'OK', 'Cancel', and 'Print'.

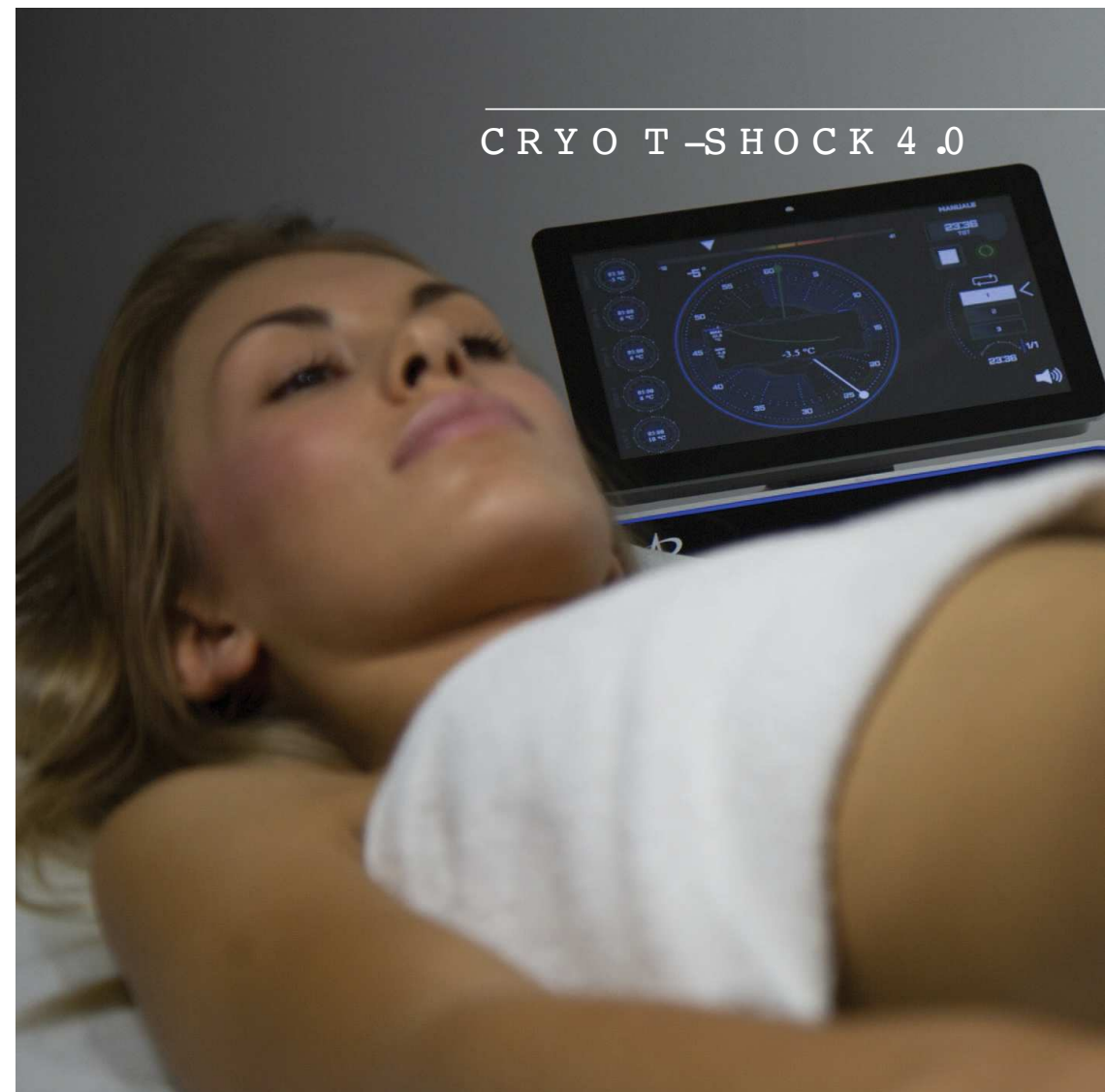

Premio Innovazione

LA MAGIA NON STA SOLO NEL NOME

CRYOTSHOCK 4.0, premiato da una giuria multidisciplinare durante la rassegna Gicare a Parigi per l'innovazione terapeutica e tecnologica introdotta, segna di fatto un passo avanti decisivo nell'utilizzo dei processi termocinetici applicati al corpo.

CRYOTSHOCK 4.0 è un complesso sistema in grado di generare caldo, freddo e campi magnetici pulsanti di bassa frequenza.

Il sistema è in grado di trasferire flussi termici, di freddo e di caldo, alternati in modo dinamico e controllato, con un feedback in tempo reale della curva delle temperature erogate, l'indicazione dei picchi raggiunti, le fasi impostate, eseguite ed ancora da eseguire.

CRYOTSHOCK 4.0 va oltre i principi e gli effetti di

qualsiasi dispositivo per crioterapia. Non è un approccio invasivo e non è aggressivo come i sistemi di vacuum e/o i dispositivi che utilizzano gas. CRYOTSHOCK 4.0 è in grado di trasferire flussi di calore, freddo e caldo, alternati in modo dinamico e controllato, con monitoraggio in tempo reale del feedback delle temperature erogate, per garantire efficacia e sicurezza. Lo shock termico stimola le risposte termoregolatrici del corpo e del drenaggio, accelera il processo metabolico e, grazie alla forte ossigenazione locale, agisce sul dolore inibendo i recettori del dolore, stimolando allo stesso tempo le endorfine. Fagocitare la risposta naturale del corpo nell'assorbimento dell'infiammazione in atto rilassa i muscoli grazie all'alternanza di fasi di vasocostrizione e vasodilatazione.

Energia Naturale

NON SOLO CRIO: CRIOTERAPIA, SHOCK TERMICO E MAGNETO

Alterazioni, squilibri non richiesti portano alla patologia con la sua evoluzione; la guarigione è il ritorno alla fisiologia, all'omeostasi ed è realizzato con diversi meccanismi di compensazione.



La criotermocinetica, composta da alternanza di calore e flussi freddi, porta benefici a condizioni croniche con un'alta tendenza all'esacerbazione, come l'artrite, le malattie degenerative delle articolazioni e la tendinite.

Modulando le temperature calde e fredde in fasi successive e temperature studiate a seconda della risposta fisiologica richiesta, CRYOTSHOCK 4.0 offre sollievo dal dolore immediato e duraturo.

Grazie a rapidi scambi di temperatura, possono essere stimolati anche la microcircolazione e il tessuto connettivo.

I cicli di riscaldamento ipertermici seguiti da una fase di riposo, stimolano l'apertura - chiusura dei piccoli vasi, ottimizzando la microcircolazione periferica, CRYOTSHOCK 4.0 emette un flusso di Campi Magnetici Pulsanti che attivano la microcircolazione favorendo l'assorbimento dei liquidi in eccesso. Si tratta di una terapia senza effetti collaterali, non invasiva e complessa, in grado di stimolare una risposta naturale che aumenta la capacità di rigenerazione dei tessuti.

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz

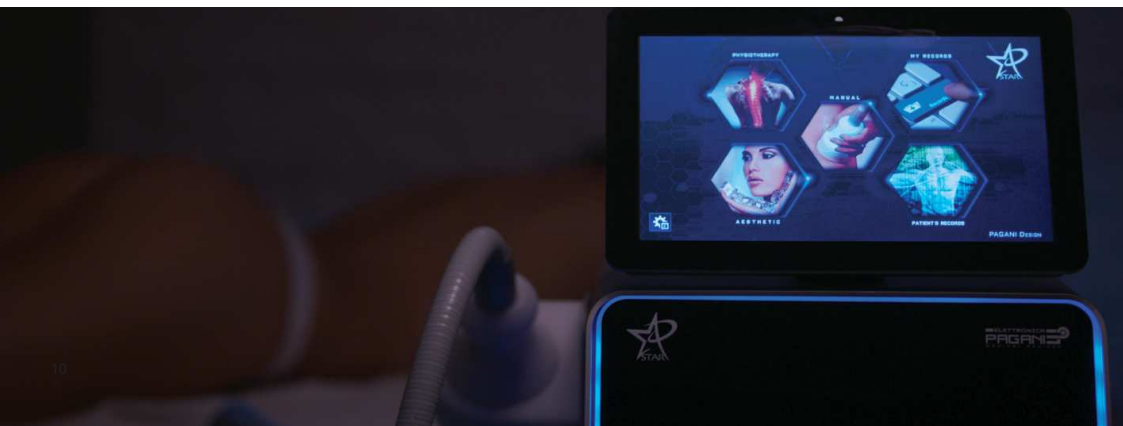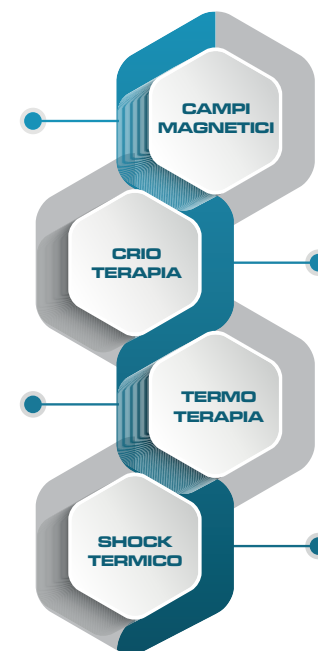

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz

Acuto e Cronico TRATTAMENTO DEI DOLORI ACUTI E CRONICI

Unire l'energia termica calda e fredda (criogenica ed ipertermica) ai campi magnetici pulsanti è la soluzione più naturale ed efficace nella risoluzione del dolore e dell'infiammazione.

CRYOTSHOCK 4.0 offre la possibilità di trattare questi problemi nelle fasi acuta, pseudo-acuta e cronica, offrendo sollievo immediato. Le applicazioni successive faranno stabilizzare l'area trattata in quanto il corpo crea condizioni fisiologiche per "autoripararsi" e il sistema linfatico drena i tessuti danneggiati, riducendo l'infiammazione.



Gli infortuni sportivi sono comuni, specialmente negli sport ad

alta intensità come calcio, basket, baseball, hockey e pallavolo.

CRYOTSHOCK 4.0 è molto efficace nell'alleviare il dolore, aumentando la mobilità e diminuendo l'infiammazione subito dopo l'infortunio e durante la fase di recupero.

CRYOTSHOCK 4.0 può essere inoltre utilizzato per ridurre il dolore ed aumentare la flessibilità durante gli esercizi di stretching e riabilitazione.

Dopo una serie di trattamenti, oltre il 90% dei pazienti raggiunge un notevole miglioramento della flessibilità e diminuisce il dolore correlato al movimento. I trattamenti localizzati di CRYOTSHOCK 4.0 sono applicabili manualmente senza restrizioni in quanto sono facilmente controllati e gestiti dall'operatore.

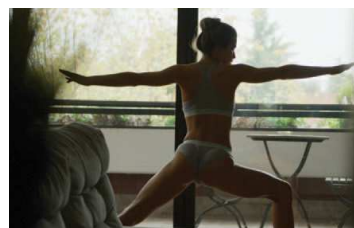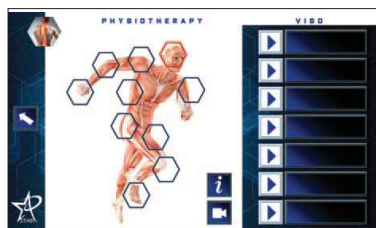

tone
slim
cellulite
fat
anti-age

CRYOTSHOCK 4.0
Sisioestetica



Bye Bye Cellulite! LA RIPOSTA ALLE PATOLOGIE DELLA CELLULITE

Gli studi mostrano che l'85-98% delle donne presenta cellulite. E' importante sottolineare che la cellulite non è un eccesso di grasso; e, secondariamente, la cellulite non ha nulla a che fare con il peso. La gravidanza è una delle cause che possono aumentare il rischio di sviluppare cellulite. Molte donne non amano l'aspetto della cellulite e preferiscono avere la pelle più liscia possibile. Depositi di grasso che spingono e distorcono i tessuti connettivi sotto la pelle, causano la comparsa di nodosità, portando alla caratteristica «pelle a buccia d'arancia». La medicina definisce la cellulite come una vera e propria patologia, chiamata panniculopatia fibrosclerotica edematosa (EFP) e, come tale, la patologia della cellulite deve essere trattata da un operatore sanitario. Oggi la risposta naturale, non invasiva più convincente per combattere i complessi sintomi della cellulite è CRYOTSHOCK 4.0, in virtù delle sue capacità di ridurre il grasso sottocutaneo ed agire sull'infiammazione e sulla ritenzione idrica.


Subito Efficace EFFICACIA DIMOSTRATA

La cellulite è composta da diversi componenti come l'infiammazione, la ritenzione di liquidi e il deposito di grasso. Questo è il motivo per cui, la consueta crioterapia, mentre può ridurre i depositi di grasso, non riduce l'aspetto della cellulite. CRYOTSHOCK 4.0 è realizzato alternando fasi di crio e riscaldamento nella stessa sessione per migliorare il drenaggio, riducendo l'edema, eliminando il deposito di grasso, stimolando il tessuto connettivo.

I Campi Magnetici Pulsanti inoltre aumentano la capacità di eliminare gli scarti metabolici, migliorano la circolazione periferica, favorendo l'assorbimento dei liquidi, la riduzione dell'edema e dell'infiammazione.

Quindi, CRYOTSHOCK 4.0 esegue un'azione più complessa della sola crioterapia per entrare in contatto con i diversi strati di tessuto ed aumentare la produzione di collagene, migliorare l'aspetto, la consistenza e l'elasticità della pelle e nel frattempo ridurre l'edema, la ritenzione di liquidi e rimuovere il grasso.

CRYOTSHOCK 4.0 favorisce l'eliminazione dei liquidi in eccesso ed i rifiuti metabolici vengono smaltiti attraverso un naturale riassorbimento del sistema linfatico. L'alternanza di freddo e caldo causa un aumento di iperemia, drenaggio e ossigeno oltre a un miglioramento della permeabilità cutanea.

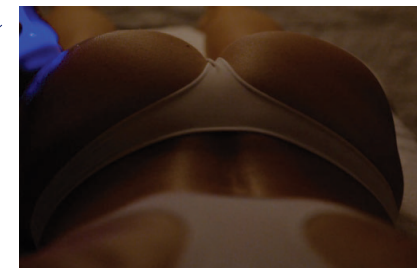

Grasso in eccesso. Tonificazione

APOPTOSI E TONIFICAZIONE

E' stato dimostrato che, in condizioni controllate attentamente, le cellule del grasso sottocutaneo sono naturalmente assai più vulnerabili agli effetti del freddo rispetto al tessuto circostante. L'esposizione al raffreddamento tramite estrazione di energia provoca l'apoptosi delle cellule grasse, processo naturale, che le porta alla morte cellulare controllata ed alla successiva e graduale eliminazione.

Questo processo abbassa la temperatura delle cellule adipose a valori compresi tra 12 e 17 ° C. È un'alternativa sicura, indolore e non chirurgica alla liposuzione.

I mediatori dell'infiammazione, gradualmente digeriscono gli adipociti lesi, soprattutto nei mesi dopo la procedura, riducendo lo spessore dello strato di grasso.

I lipidi liberati dalle cellule adipose degradate, si rilasciano lentamente e trasportati dal sistema linfatico sono eliminati, similmente al grasso alimentare.

Aumento del consumo calorico

Il metabolismo basale è influenzato dalle variazioni di temperatura indotte dal CRYOTSHOCK 4.0 con un aumento del 13% del consumo calorico per grado centigrado in meno rispetto alla temperatura corporea normale. Lo shock termico dinamico e controllato di CRYOTSHOCK 4.0 è una forma di energia di comprovata efficacia biologica che, quando amministrata e sottratta in modo controllato e combinato, diventa la risposta non chirurgica più avanzata alla modellatura del corpo, alla riduzione del grasso e alla pelle dall'aspetto più giovane e tonico.

Il compattamento e la ripristinata elasticità del tessuto connettivo con il conseguente blocco metabolico del grasso sottocutaneo non avviene attraverso la somministrazione di farmaci, ma grazie all'energia naturale ed al micromassaggio, che si concentra sui primi 2/4 cm di profondità, dove il grasso si trova. I risultati raggiunti da CRYOTSHOCK 4.0 sono evidenti anche nel miglioramento dell'inelasticità.

Face Lift

ANTI-ETÀ E RINGIOVANIMENTO DELLA PELLE

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz

L'invecchiamento della pelle è un processo fisiologico legato all'età ed al patrimonio genetico.

Quasi tutti i segni dell'invecchiamento della pelle possono essere attribuiti a un riduzione di collagene ed elastina, che lascia il posto a linee sottili e rughe con l'avanzare dell'età.

Provocare uno shock, raffreddando o provocando shock termico (alternando freddo e caldo) sulla pelle del collo e del viso, significa indurre stimolazione di collagene. Questo appianerà le linee del viso, ridurrà imperfezioni, rughe e renderà l'aspetto più compatto in pochi minuti.

Contrasta efficacemente i segni del tempo

Il trattamento richiede solo pochi minuti, non ha praticamente

effetti collaterali e produce ottimi risultati.

CRYOTSHOCK 4.0 è il trattamento più innovativo e non invasivo per contrastare la perdita di tono della pelle e del tessuto muscolare e la comparsa di rughe. Questo trattamento viene definito un "lifting senza bisturi"; infatti permette di ottenere risultati particolarmente interessanti senza intervento chirurgico. La metodica non è invasiva e non è dolorosa è indicata, per migliorare la qualità della pelle attenuando i principali inestetismi legati all'età quali ad esempio rughe, o presenza di tessuti meno elastici o poco tonici.





slim SLIM *FAT*
cellulite CELLULITE *fat*



Trattamenti statici VERSATILITÀ ED EFFICACIA

CRYOSHOCK 4.0 offre un trattamento innovativo, non invasivo ed indolore che offre risultati eccellenti sin dalle prime sedute.

In piena sicurezza, oggi puoi anche effettuare un trattamento statico, senza l'impiego dell'operatore e con una grande efficacia, mirato per ridurre le imperfezioni della pelle dovute a grasso localizzato e cellulite.

La temperatura nei trattamenti statici è regolabile sino ad un minimo di zero gradi e si svolge in tutta sicurezza, alternando momenti fasi criogeniche a fasi termiche.



Risultati reali

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
 VENEZIA
 tel.0415415253
www.righetto.biz




Dimagrimento confortevole **TRATTAMENTO CORPO+VISO**

CRYOTSHOCK 4.0 consente di effettuare contemporaneamente trattamenti per il corpo con gli applicatori statici da fissare mediante apposita fascia elastica e anti-invecchiamento del viso con la testina manuale. Sono disponibili due impostazioni diverse e separate per la regolazione dei parametri su ciascun lato. L'ampio display mostra tutti i dettagli utili ed è possibile collegare al paziente da 1 a 4 applicatori statici, a seconda dell'area da trattare. E'

possibile combinare diverse aree del corpo, come due gambe, o glutei e gambe, addome e maniglie dell'amore, ecc. Allo stesso tempo, è possibile utilizzare l'applicatore facciale con i parametri pertinenti per trattare anti-invecchiamento, rughe, stimolazione di elastina e collagene.


Il trattamento si svolgerà nel pieno comfort ed i risultati delle applicazioni saranno sorprendenti!

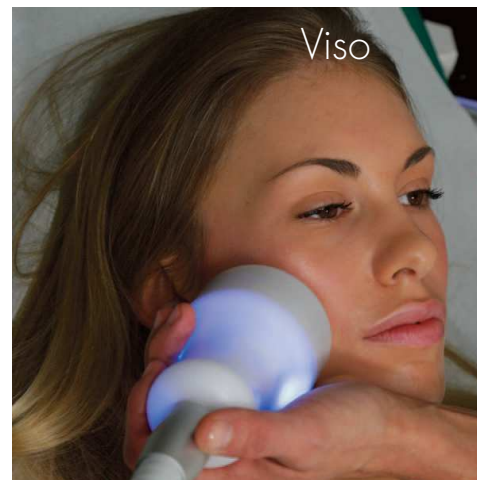

Viso



Addome

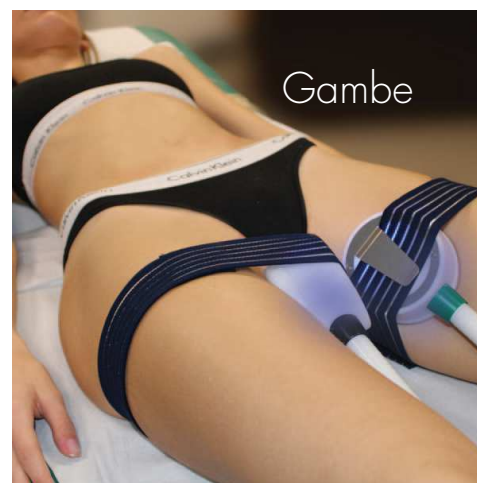

Gambe



Gambe e glutei



DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz

CRYOTSHOCK Slim



SHOCK TERMICO DINAMICO E CONTROLLATO

CRYOTSHOCK è disponibile nella versione dedicata ai trattamenti Riabilitativi/Fisioterapici in cui la temperatura è regolabile da zero a 41°C ed è di fatto possibile eseguire qualsiasi trattamento ipertermico e crioterapico dinamico e controllato, tenendo conto che normalmente i range di temperatura ideali nella terapia del dolore ed anti-infiammatoria è compreso tra i +4°C ed i +40°C.

STOP AL DOLORE!

CRYOTSHOCK offre la possibilità di trattare questi problemi nelle fasi acuta, pseudo-acuta e cronica, offrendo sollievo immediato. Le applicazioni successive faranno stabilizzare l'area trattata in quanto il corpo crea condizioni fisiologiche per "autoripararsi" e il sistema linfatico drena i tessuti danneggiati, riducendo l'infiammazione.

Gli infortuni sportivi sono comuni, specialmente negli sport ad alta intensità come calcio, basket, baseball, hockey e pallavolo. CRYOTSHOCK è molto efficace nell'alleviare il dolore, aumentando la mobilità e diminuendo l'infiammazione subito dopo l'infortunio e durante la fase di recupero.

CRYOTSHOCK può essere inoltre utilizzato per ridurre il dolore ed aumentare la flessibilità durante gli esercizi di stretching e riabilitazione.

Dopo una serie di trattamenti, oltre il 90% dei pazienti raggiunge un notevole miglioramento della flessibilità e diminuisce il dolore correlato al movimento. I trattamenti localizzati di CRYOTSHOCK sono applicabili manualmente senza restrizioni in quanto sono facilmente controllati e gestiti dall'operatore.

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz

STARWAVE

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz



Protagonista DA SEMPRE PROTAGONISTA

STARWAVE è l'ultimo dispositivo sviluppato da PAGANI nel campo della Terapia ad Onde d'Urto non focalizzate (radiali).

STARWAVE si propone di continuare il successo in una chiave più moderna già segnato grazie alla prima versione Roland PSW, un dispositivo rivoluzionario e precursore, che è stato il primo dispositivo di terapia ad onde d'urto realizzato in Italia.

Oggi, STARWAVE offre ai professionisti del settore medico-fisioterapico prestazioni terapeutiche e tecnologiche in un dispositivo compatto ed innovativo.

STARWAVE è la macchina ideale, per compattezza, prestazioni, modalità di emissione per tutti i centri di fisioterapia, per trattare con successo le svariate patologie di carattere infiammatorio e doloroso del sistema osteomiotendineo.



DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz

Manipolo Intelligente COMFORT ED AFFIDABILITÀ

STARWAVE è dotato di applicatori brevettati per un trattamento efficace e allo stesso tempo minimamente aggressivo.

L'applicatore progettato da PAGANI è costituito da una speciale area radiante; l'energia viene trasferita dall'area radiante al tessuto del paziente grazie alla spinta esercitata sul percussore. Le capacità di trasmissione dell'applicatore sono state testate presso il laboratorio specializzato della Breda, uno dei siti più competenti che opera in collaborazione con l'Università di Milano. Ogni applicatore è stato testato in termini di profondità, penetrazione ed energia erogata utilizzando alcuni simulacri dei vari tessuti corporei.

Ergonomia

L'applicatore leggero ed ergonomico garantisce un comodo utilizzo durante il trattamento. I tasti di controllo, integrati nell'applicatore, consentono una regolazione pratica dell'energia erogata e della frequenza.

Lunga durata e minima manutenzione

Il manipolo è stato progettato per conferire qualità e durata. Ogni parte del manipolo può essere mantenuta e, se necessario, sostituita. Economico nella manutenzione e nel servizio post-vendita, STARWAVE diventerà il tuo alleato più

MANIPOLO INTELLIGENTE





Terapia di Successo

UN PRODOTTO INNOVATIVO PER UNA METODICA DI SUCCESSO

La Terapia ad Onde d'Urto ha di fatto cambiato l'approccio generale in molte patologie. Ed oggi, grazie a STARWAVE, questo nuovo approccio terapeutico diventa sempre più adattato ai bisogni ed alla conoscenza degli ambulatori Medico- Fisioterapici.

La Terapia con Onde d'Urto si è rivelata particolarmente efficace nel trattamento delle patologie tendinee, nella borsite, nella stimolazione della riparazione dei tessuti in generale, dove iperemia e vascolarizzazione locale giocano un ruolo importante e la stimolazione meccanica induce sollievo dal dolore.

I benefici terapeutici arrivano insieme alla riduzione della tensione muscolare, il recupero funzionale, la riduzione del dolore e il ripristino delle normali condizioni fisiologiche.

Stop al Dolore

DOLORE E INFIAMMAZIONE

È ragionevole pensare che la rivascularizzazione debba essere correlata alla neocapillarogenesi proveniente dalla riparazione della membrana basale e dovuta al flusso di cellule endoteliali negli spazi interstiziali.

Ecco perché la Terapia ad Onde d'Urto rende più facili e veloci i cambiamenti metabolici nei tessuti colpiti, stimolando i processi riparativi e il processo di elasticità dei tessuti molli.

I vantaggi e le applicazioni della Terapia ad Onde d'Urto sono ancora in espansione, per una metodica che ha già contribuito in modo significativo a cambiare l'approccio terapeutico in diverse patologie, contribuendo a migliorare la vita di migliaia di pazienti in tutto il mondo.

La Terapia ad Onde d'Urto è di fatto una metodica assolutamente non invasiva, dai contenuti effetti collaterali e con grandi possibilità di intervenire sul dolore, sull'edema, sull'infiammazione e sulla rigenerazione dei tessuti.

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz






DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
 VENEZIA
 tel.0415415253
 www.righetto.biz

Soddisfazione dei Pazienti

- | | | |
|---|--|---|
| <p>1 150 calcificazioni
210 tendiniti
74% POSITIVI</p> <p>2 78 epicondiliti e epitrocleiti
75% POSITIVI</p> | <p>3 48 pubalgia
24 SII
94% POSITIVI</p> <p>4 15 rizoartrosi
33 dito a scatto
71% POSITIVI</p> | <p>5 48 tendiniti
84% POSITIVI</p> <p>6 84 tendine d'achille
51 fasciti plantari
87% POSITIVI</p> |
|---|--|---|

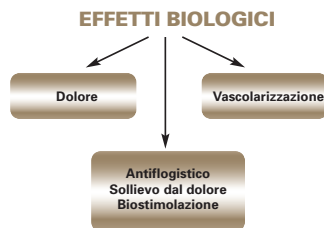

Body Sculpting

SCOLPISCE IL TUO CORPO

STARWAVE, nelle mani esperte del professionista, diventa come il cesello dello scultore che plasma e ritocca la sua scultura a regola d'arte, facendole assumere forme più gradevoli ed aggraziate.

Studi clinici condotti a livello internazionale documentano gli effetti benefici delle onde d'urto nel trattamento di alcuni dei più diffusi inestetismi, come le celluliti localizzate, i difetti di circolazione, l'elasticità cutanea, l'adipe localizzato. Sono stati infatti messi in evidenza i miglioramenti dell'elasticità tegumentaria, il ripristino circolatorio metabolico, la riduzione del volume adipocitario ed edematoso.

Il compattamento del tessuto connettivo con il conseguente blocco metabolico del grasso sottocutaneo non si verifica attraverso la somministrazione di farmaci, ma grazie all'energia meccanica ed al micromassaggio, che si concentra sui primi 2 / 4 cm di profondità, dove la cellulite si trova.

L'eliminazione dei liquidi in eccesso e dei rifiuti metabolici avviene attraverso un naturale riassorbimento del sistema linfatico; le onde d'urto causano un aumento della permeabilità cutanea preparandola all'uso di gel anti-cellulite o altre sostanze rassodanti e/o drenanti.



Non Invasiva

SOLUZIONE TERAPEUTICA NON INVASIVA

L'utilizzo delle onde d'urto si basa sulle vibrazioni meccaniche capaci di trasmettersi sui tessuti del corpo umano come vere e proprie onde acustiche. Una delle proprietà più importanti delle onde acustiche riguarda la cavitazione, in base alla quale fenomeni di espansione e di compressione repentini finiscono per causare implosione delle cellule ed in particolare delle cellule adipose.

Il trattamento mediante onde acustiche non è solo un trattamento rivolto alla cellulite, ma è efficacemente impiegato nel trattamento dei difetti estetici della pelle, delle lassità cutanee, degli edemi di natura estetica.

L'energia meccanica viene assorbita dal tessuto e diminuisce all'aumentare della distanza dal sito di applicazione. Lo stress meccanico innesca reazioni nei tessuti che hanno un'influenza positiva su un'ampia gamma di condizioni correlate agli inestetismi. La terapia ad onde d'urto viene utilizzata con grande successo.

Con STARWAVE, PAGANI offre ora un sistema che riunisce tutti i vantaggi dell'applicazione in una forma compatta, con minori costi operativi, facile da usare e da applicare con la massima flessibilità e mobilità.

Per affrontare i trattamenti estetici con successo e nel confort del paziente, il manipolo con applicatori ad assorbimento controllato garantiscono l'esecuzione di un trattamento efficace nel pieno comfort della paziente.



DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz

STARTECAR

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz



Il futuro **IL FUTURO È NELLE TUE MANI**

Scopri come i nuovi standard di STARTECAR sono in grado di supportare il tuo lavoro ed ottimizzarne gli effetti per la soddisfazione tua e dei tuoi pazienti.

STARTECAR è il nuovo punto di riferimento nel campo dei dispositivi per tecarterapia; le sue caratteristiche funzionali, terapeutiche, le soluzioni tecnologiche adottate lo rendono un dispositivo unico, precursore nel suo campo ed adatto a chi desidera una "Tecarterapia Evoluta", che va al di là dei soliti schemi convenzionali, che supera limiti già conosciuti, per affrontare con efficacia ed innovazione patologie sempre più ampie e complesse, offrendo soluzioni funzionali uniche e d'avanguardia.

Perché la tecnologia è utile solo quando è in grado di conferire valore aggiunto al tuo lavoro.




Tecarterapia Evoluta **OLTRE OGNI VOSTRA MIGLIORE ASPETTATIVA**

La Tecarterapia è una modalità terapeutica che consente il trasferimento di energia elettromagnetica a diversi strati cellulari, dal superficiale al profondo. Tale trasferimento energetico ha la proprietà di trasformarsi all'interno dei tessuti del corpo in calore, da moderato ad intenso.

L'innalzamento della temperatura ed il conseguente aumento del flusso ematico stimola i processi di riparazione tissutale, favorendo l'apporto di substrati organici e l'eliminazione di cataboliti dall'area di lesione.

STARTECAR viene utilizzata per stimolare i processi di guarigione e, per il suo effetto antalgico, nel trattamento di forme patologiche acute e croniche dell'apparato locomotore.

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz

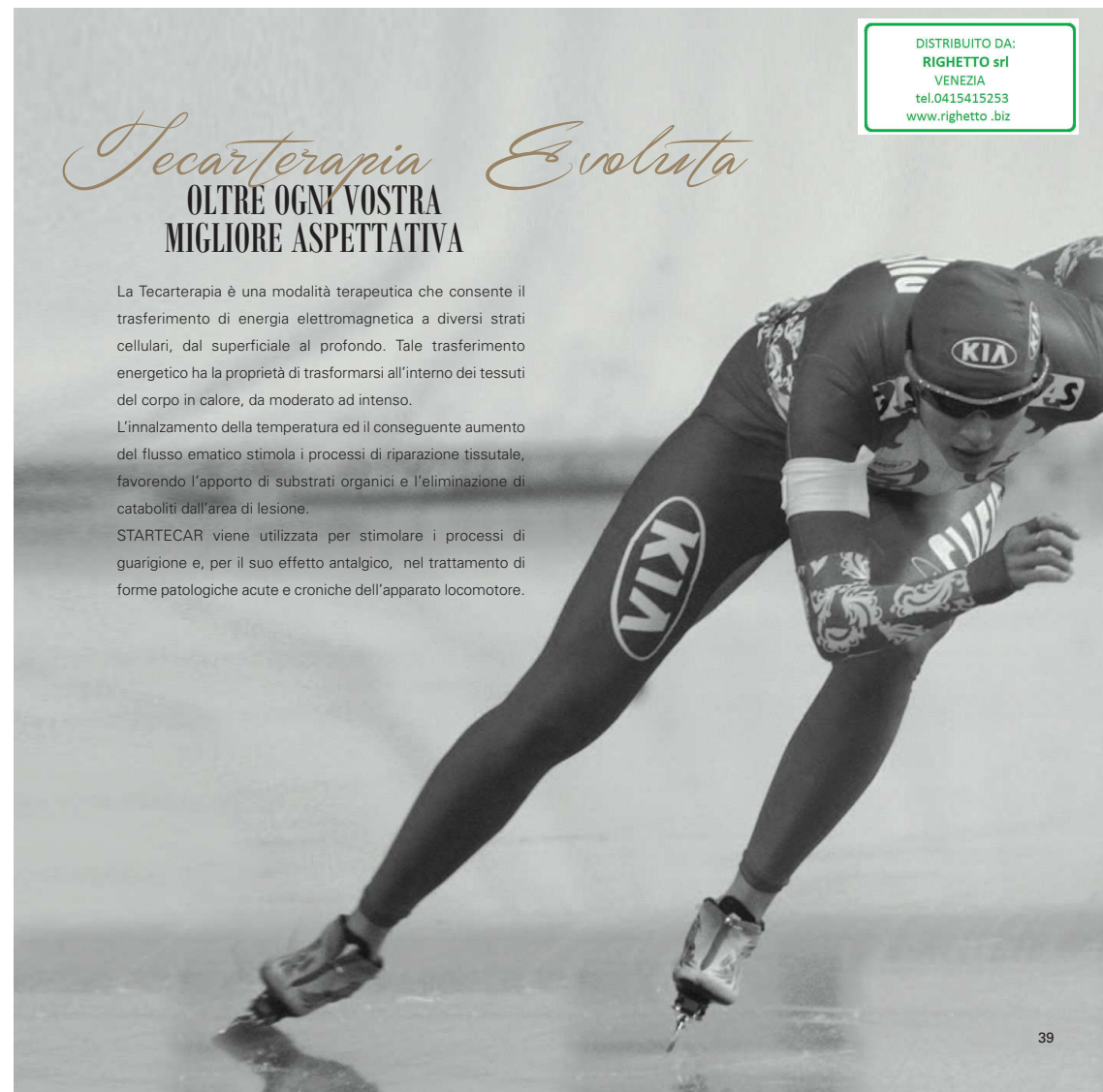

Sempre Avanti **FLEXI: ELETTRODO NEUTRO AD ALTA EFFICIENZA**

FLEXI è l'elettrodo ad alta efficienza messo a punto in esclusiva da Elettronica PAGANI.

FLEXI è destinato a modificare il concetto di tecarterapia e radiofrequenza diatermica.

FLEXI è realizzato in materiale altamente conduttivo che permette l'utilizzo di apposito gel elettroconduttivo, consentendo di fatto la possibilità di scegliere tra un normalissimo gel privo di medicamento e gel a contenuto medicamentoso, con principi attivi anti-infiammatori e/o antalgici per esempio, ovvero altri principi naturali per la tonificazione cutanea, muscolare, il miglioramento della circolazione, la stimolazione dell'elasticità cutanea e delle sostanze di collagene.



Versatilità e Praticità **TANTI VANTAGGI PER INTERVENIRE CON SUCCESSO**

- Si adatta a qualsiasi parte del corpo. FLEXI si piega, si applica con l'interposizione di gel dedicato o medicamentoso, si fissa con una semplice fascia elastica. Si deterge, si pulisce ed è pronto all'uso.
- Permette l'utilizzo di gel medicamentoso per rendere ancora più specifico ed efficace il trattamento. Puoi usare qualsiasi FANS o anti-infiammatorio naturale, ad esempio a base di arnica per potenziare l'azione antalgica ed anti-infiammatoria del trattamento.
- Permette il trattamento in modalità statica, mediante l'utilizzo di due elettrodi FLEXI. In modo sicuro ed efficace, puoi usare due elettrodi FLEXI per eseguire tecarterapia in modo statico, senza l'aiuto dell'operatore, quando il massaggio, in virtù della patologia, della sua fase, o della sua localizzazione, non è né utile né necessario.



Profondo ed Efficace AZIONE MIRATA

La Tecarterapia è un trattamento esogeno in grado di stimolare il corpo umano a trasformare l'energia esogena trasferita in calore. Il corpo, quindi, sottoposto al trasferimento di energia della tecar, trasforma l'energia in calore, dando vita ad un insieme di processi di autoguarigione naturali, in grado di combattere i processi infiammatori e ridurre il dolore.

Il segreto dell'efficace di STARTECAR risiede proprio nella sua capacità di interagire con i vari strati cellulari del corpo, dal più superficiale al più profondo.

L'operatore, impostando le modalità Capacitiva o Resistiva, regolando l'intensità, potrà interagire maggiormente con gli strati più superficiali o più profondi a seconda delle necessità terapeutiche e degli scopi perseguiti.

400W




STARTECAR

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz

200 W





Feel the Difference

TERAPIA CAPACITIVA E RESISTIVA

Tecar o "trasferimento elettrico capacitivo e resistivo" funziona generando un'attivazione fisiologica all'interno dei tessuti interni del corpo attraverso tre reazioni:

1. aumento della microcircolazione;
2. vasodilatazione;
3. termoterapia.

L'aumento della temperatura e il conseguente aumento del flusso sanguigno stimolano i processi di riparazione dei tessuti, favorendo il contributo dei substrati organici e l'eliminazione dei cataboliti dall'area della lesione.

STARTECAR è usata per stimolare i processi di guarigione e, per il suo effetto antalgico, nel trattamento delle forme patologiche acute e croniche dell'apparato locomotore.

Riduce i tempi di recupero accelerando i naturali meccanismi di guarigione del corpo.

Evita gli effetti collaterali di alcuni farmaci, come antinfiammatori e antidolorifici.

- Sollievo dal dolore
- Miglioramento del processo infiammatorio
- Riduzione dei tempi di recupero

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz


Interactive Probe

UN PRODOTTO ESCLUSIVO

IP è realizzato in esclusiva da PAGANI per consentire un confortevole massaggio, sicuro e nel pieno rispetto dell'ergonomia della forma della mano e del gesto del massaggio.

Chiunque può impugnare il manipolo in modo pratico e confortevole, per eseguire un massaggio efficace e sempre in pieno relax, con la massima protezione sia da eventuali correnti disperse, sia dal campo elettromagnetico erogato sul paziente.



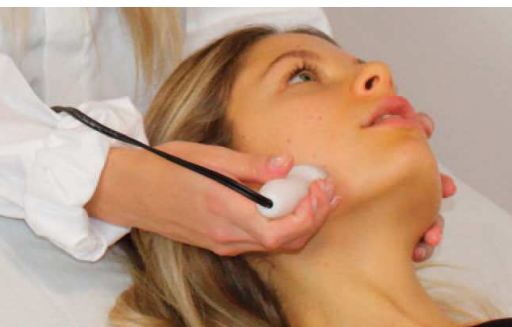

Bipolare **ELETTRODO BIPOLARE**

I trattamenti con tecnica bipolare vengono eseguiti mediante un manipolo cilindrico ove sono presenti sia l'elettrodo neutro che l'elettrodo attivo. In tal modo, l'emissione rimane locale e circoscritta ai due elettrodi.

Particolarmente utile diventa l'applicazione locale nei trattamenti sul viso, sulle falangi, sul polso e su tutte le altre parti anatomiche di piccole dimensioni.



PRIMA



DOPO



DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz

Drena e Tonifica **DRENA, RENDE LA PELLE PIÙ TONICA ED ELASTICA**

L'invecchiamento della pelle è un processo fisiologico legato all'età ed al patrimonio genetico, ma può essere contrastato con una discreta efficacia mediante l'utilizzo della radiofrequenza diatermica della Tecarterapia Evoluta.

Il calore indotto da STARTECAR provoca denaturazione e contrazione delle fibre di collagene, stimolandone la riproduzione. Per tale motivo, STARTECAR è efficace sia nei trattamenti del viso che nel trattamento del corpo.

Viso e Corpo **RINGIOVANIMENTO CUTANEO FACCIALE E CORPOREO**

L'interesse in merito al rimodellamento del corpo e la stimolazione dei tessuti ai fini estetici è cresciuto molto rapidamente negli ultimi anni soprattutto grazie all'energia di radiofrequenza (RF) che effettivamente stimola e ringiovanisce i tessuti. Per quanto concerne i trattamenti del viso, il trattamento di RF è noto come "RF face lift" o "Radio Frequency Facial", grazie alla sua riduzione delle rughe e alle capacità di ringiovanimento della pelle complessiva.

Il calore prodotto è idoneo a tonificare il derma (lo strato superiore della pelle), con conseguente riduzione delle rughe. Un altro importante effetto benefico del trattamento a radiofrequenza è la

stimolazione di una maggiore produzione di collagene ed elastina, nonché una maggiore circolazione del sangue. Quest'azione si esprime in un complessivo ringiovanimento della pelle.

Il calore generato da STARTECAR aumenta il metabolismo dello strato grasso e riduce la dimensione delle cellule adipose. I trattamenti di rassodamento della pelle mediante RF sono sicuri per tutte le pigmentazioni della pelle e possono essere eseguiti anche sulla pelle abbronzata.

È possibile prevedere un graduale miglioramento della cellulite nelle aree trattate. I vantaggi derivanti dal trattamento includono una migliore circolazione e sollievo dai dolori muscolari nelle aree trattate.

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz



STARWAVE
Focused


DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel. 0415415253
www.righetto.biz



Terapia Ambulatoriale INNOVAZIONE ED EFFICACIA

Studiato e testato in collaborazione con i migliori professionisti, **STARWAVE** è un dispositivo innovativo ed efficace per discipline mediche altamente specializzate.

STARWAVE offre programmi ed applicatori adeguati, in grado di ottenere il meglio, rispettando il comfort dell'operatore, la sicurezza, le esigenze del paziente e l'igiene. Dalla Medicina Fisioterapia ed Ortopedica alla Medicina Andro-Urologica, dalla Medicina dello Sport alla Medicina Fisioestetica, **STARWAVE**, grazie alla complessità e molteplicità delle sue caratteristiche, è in grado di garantire un'ampia versatilità di impiego e coinvolgere svariate figure sanitarie che possono ottimizzare il suo utilizzo.

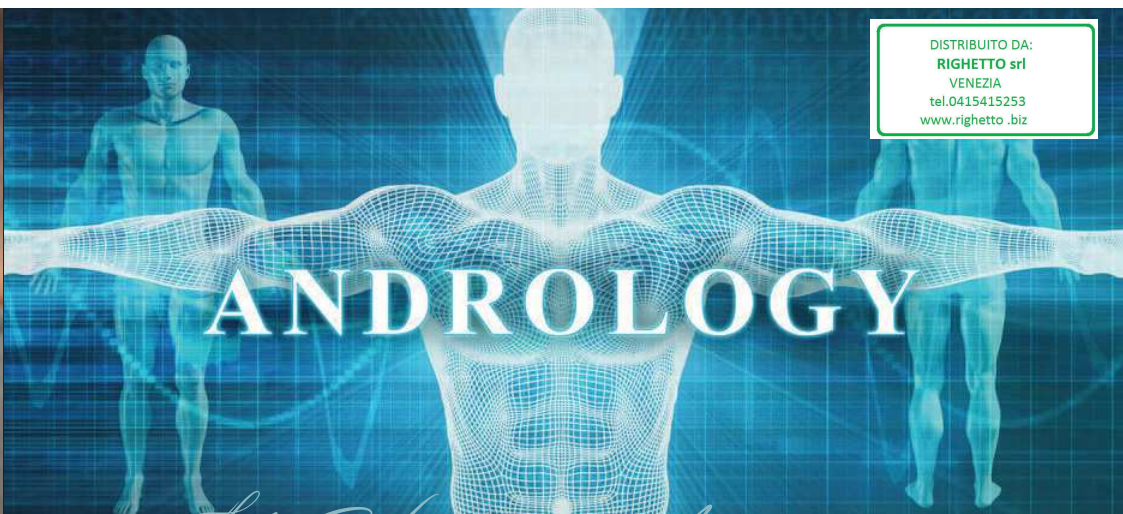

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz

Il Valore Aggiunto UNA TECNOLOGIA MAI FINE A SE STESSA


STARWAVE è un dispositivo medico per terapia ad onde d'urto che utilizza la tecnologia elettromagnetica. Un gruppo di bobine poste nella sonda viene attivato dal circuito ad alta tensione dell'unità stessa creando il campo elettromagnetico necessario per muovere un proiettile all'interno della canna di scorrimento; il percussore, grazie alla pressione meccanica così esercitata, crea un'onda d'urto all'interno della camera di propagazione dell'applicatore fissata sulla parte superiore della sonda. L'onda d'urto viene così emessa in modalità focalizzata.

*La tecnologia e l'innovazione
sono utili solo quando
possono offrire un valore aggiunto!*

Trattamenti Puntuali

APPLICATORE FOCALIZZATO COPERTO DA BREVETTO

STARWAVE è dotato di un applicatore "brevetato" in grado di rilasciare onde d'urto focalizzate. Ai laboratori Breda è stata affidata l'analisi delle modalità e delle capacità di emissione dell'applicatore. Appositi simulacri dei principali tessuti cellulari (tendine, muscoli e ossa) sono stati utilizzati per testare la propagazione dell'onda d'urto confutandone il fuoco ed almeno il 50% dell'energia rilasciata dal dispositivo alle varie profondità dei simulacri. La profondità di azione è calibrata in funzione dei due diversi applicatori, che abbiamo definito dry ed oil. Il dry è dotato di terminale metallico ricoperto da una membrana di gomma in grado di attenuare l'onda diretta sul punto di contatto con il corpo del paziente, conservandone però direzionalità ed omogeneità di trasmissione; mentre l'oil è dotato di una camera di propagazione all'interno della quale si sprigiona l'onda d'urto "primitiva" che, opportunamente convogliata, viene poi trasmessa in modo controllato al paziente.

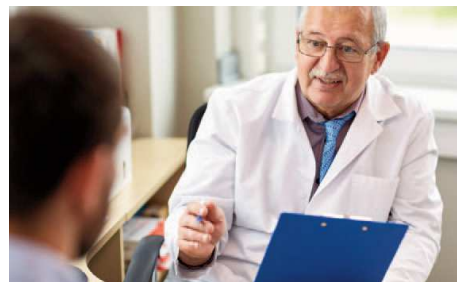

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz

Cura miracolosa? Una soluzione Efficace!

ONDE D'URTO: SOLUZIONE PERMANENTE E NON INVASIVA

La terapia a onde d'urto è un trattamento sicuro, tollerabile ed efficace che è privo di farmaci, senza chirurgia, totalmente non invasivo, non richiede anestesia, viene eseguito a livello ambulatoriale e fornisce risultati di lunga durata. L'onda d'urto prende di mira il meccanismo erettile in modo che l'uomo abbia maggiori probabilità di avere erezioni spontanee, senza l'ausilio di farmaci. La disfunzione erettile (DE) è definita come incapacità totale o parziale "costante" di raggiungere e / o mantenere un'erezione. Riscontrato soprattutto nei pazienti di età superiore ai 50 anni, recentemente è diventato un problema anche nei giovani, la disfunzione erettile è una patologia che sta aumentando e oltre il 20% degli uomini

ne soffre attualmente. Le onde d'urto sono entrate anche nei protocolli comuni della malattia di Peyronie "Induratio Penis Plastica", caratterizzata da fibrosi peniena e conseguente curvatura con notevoli benefici anche sul normale recupero dell'erezione, nonché sulla riduzione del dolore all'erezione e sull'estensione della placca. Nella pratica clinica le onde d'urto a bassa intensità vengono trasmesse attraverso un manipolo dotato di un applicatore, stimolano la creazione di nuove reti di vasi sanguigni nel tessuto del pene, ripristinando così un'erezione. Questo meccanismo d'azione, chiamato neoangiogenesi, consente al paziente di ottenere un'erezione duratura senza l'uso di farmaci.



Risposta terapeutica



LA RISPOSTA ATTESA DA MEDICI E PAZIENTI!

La non invasività, l'elevata tollerabilità del trattamento da parte del paziente, l'assenza di effetti collaterali, la possibilità di eliminare o ridurre totalmente l'uso di farmaci, la discrezione nell'uso, fanno della terapia ad Onde d'Urto a bassa intensità la scelta preferita da medici e pazienti per il trattamento dell'ED. Ciò che sembrava fino a poco tempo fa solamente auspicabile, oggi è realtà ed è una vera e propria terapia non chirurgica, non invasiva e senza l'ausilio di farmaci.

Da uno dei nostri studi clinici condotti su 78 pazienti è stato osservato un miglioramento del punteggio in oltre l'82% dei pazienti trattati con un miglioramento anche nel PSV (Picco Sistolico di Velocità al Doppler penieno dinamico).



Un follow-up effettuato dopo 8 mesi dal trattamento ha altresì confermato la stabilità dei risultati sopra menzionati.

Lo studio ha dimostrato l'efficacia del miglioramento dell'emodinamica vascolare del pene e il beneficio della riabilitazione vascolare della disfunzione erettile.

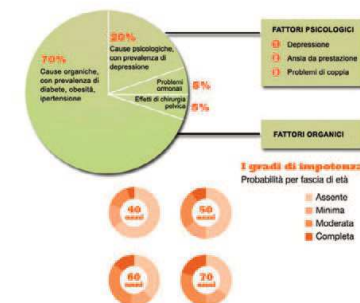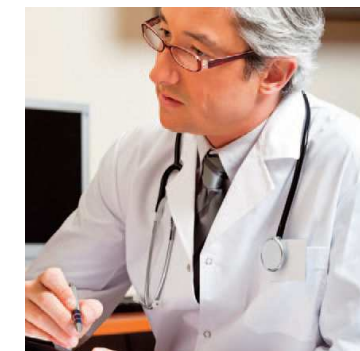

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz

Protocolli terapeutici DE, IPP, CPPS

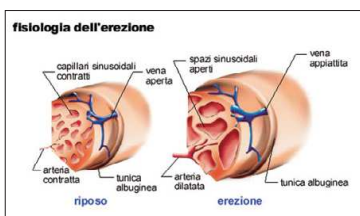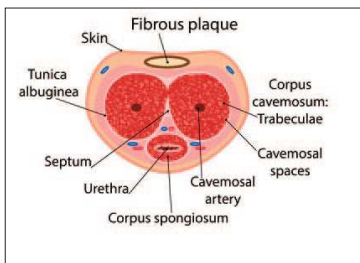

Oltre al trattamento della disfunzione erettile ampiamente citato nelle pagine precedenti, **STARVAVE** propone altri due programmi ben definiti ai quali ciascun operatore può ricorrere, utilizzandolo così come viene proposto, adattarlo alla sensibilità di ciascun paziente, ovvero regolarlo in funzione delle proprie esperienze.

Trattamento della disfunzione erettile

- Promuove la vascolarizzazione e l'elasticità dei tessuti del pene, migliorando di conseguenza la qualità dell'erezione
- Stimola la rigenerazione delle strutture nervose responsabili del controllo dell'erezione
- Ripristina l'endotelio e la muscolatura liscia

Trattamento della Induration Penis Plastica (IPP)

- Stimola la produzione di fattori che favoriscono l'angiogenesi modulando l'attività delle cellule infiammatorie che sembrano essere quelle dirette responsabili della formazione della placca
- Stabilizza la placca con l'interruzione della progressione della malattia
- Riduce la placca e le sue dimensioni
- Riduce o elimina il dolore causato dalla placca

Trattamento della sindrome del dolore pelvico cronico

- Promuove una maggiore vascolarizzazione
- Induce un aumento dei segnali antinfiammatori
- Induce una riduzione del tono muscolare passivo
- Riduce la sindrome dolorosa del pavimento pelvico



Archivio pazienti TRATTAMENTO DOPO TRATTAMENTO IL FUTURO IN ANTEPRIMA

STARVAVE offre al Medico il supporto necessario per effettuare alcune valutazioni del paziente in ingresso (prima del trattamento) ed in uscita (dopo il ciclo di trattamenti), con le proprie considerazioni. Cosicché, per ciascuna patologia vengono raccolti i parametri utili a costituire una memoria e dati oggettivi da poter conservare e paragonare, sempre in linea con la bibliografia internazionale.



DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz




Stop al Dolore **DOLORE E INFIAMMAZIONE**

È ragionevole pensare che la rivascolarizzazione debba essere correlata alla neocapillarogenesi proveniente dalla riparazione della membrana basale e dovuta al flusso di cellule endoteliali negli spazi interstiziali.

Ecco perché la Terapia ad Onde d'Urto rende più facili e veloci i cambiamenti metabolici nei tessuti colpiti, stimolando i processi riparativi e il processo di elasticità dei tessuti molli.

I vantaggi e le applicazioni della Terapia ad Onde d'Urto sono ancora in espansione, per una metodica che ha già contribuito in modo significativo a cambiare l'approccio terapeutico in diverse patologie, contribuendo a migliorare la vita di migliaia di pazienti in tutto il mondo.

La Terapia ad Onde d'Urto è di fatto una metodica assolutamente non invasiva, dai contenuti effetti collaterali e con grandi possibilità di intervenire sul dolore, sull'edema, sull'infiammazione e sulla rigenerazione dei tessuti.

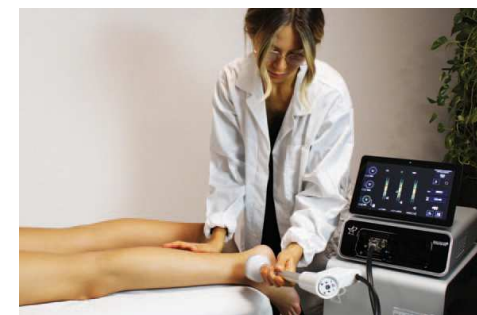


DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz

Espressione di Intelligenza


FOCUSED EMISSION

STARWAVE è un generatore di Onde d'Urto Focali: si tratta di onde d'urto "intelligenti" di tipo focale ad emissione limitata ed adeguata alle esigenze di svariate patologie.

Ogni trattamento avviene mediante l'interposizione di un apposita cover di tipo monouso che al termine della terapia viene gettata, onde garantire le più elevate condizioni igieniche.

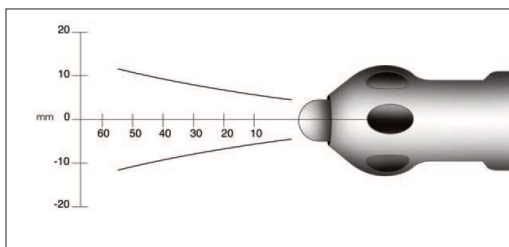

Ampiezza dell'energia di flusso.

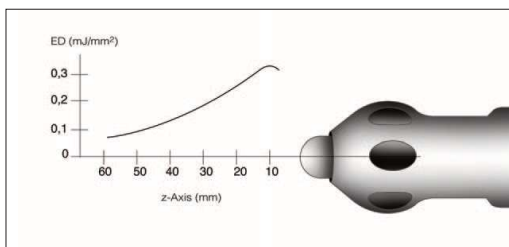


Area di trattamento in funzione della profondità.



DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz

Soddisfazione dei Pazienti

- | | | |
|---|--|---|
| 1 150 calcificazioni
210 tendiniti
74% POSITIVI | 3 48 pubalgia
24 SII
94% POSITIVI | 5 48 tendiniti
84% POSITIVI |
| 2 78 epicondiliti e epitrocleiti
75% POSITIVI | 4 15 rizoartrosi
33 dito a scatto
71% POSITIVI | 6 84 tendine d'achille
51 fasciti plantari
87% POSITIVI |

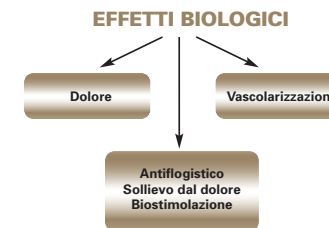



Terapia di Successo

UN PRODOTTO INNOVATIVO PER UNA METODICA DI SUCCESSO

La Terapia ad Onde d'Urto ha di fatto cambiato l'approccio generale in molte patologie. Ed oggi, grazie a **STARWAVE**, questo nuovo approccio terapeutico diventa sempre più adattato ai bisogni ed alla conoscenza degli ambulatori Medico- Fisioterapici.

La Terapia con Onde d'Urto si è rivelata particolarmente efficace nel trattamento delle patologie tendinee, nella borsite, nella stimolazione della riparazione dei tessuti in generale, dove iperemia e vascolarizzazione locale giocano un ruolo importante e la stimolazione meccanica induce sollievo dal dolore.

I benefici terapeutici arrivano insieme alla riduzione della tensione muscolare, il recupero funzionale, la riduzione del dolore e il ripristino delle normali condizioni fisiologiche.



STARWAVE
Fisioestetica

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz


Body Sculpting SCOLPISCE IL TUO CORPO

STARWAVE, nelle mani esperte del professionista, diventa come il cesello dello scultore che plasma e ritocca la sua scultura a regola d'arte, facendole assumere forme più gradevoli ed aggraziate.

Studi clinici condotti a livello internazionale documentano gli effetti benefici delle onde d'urto nel trattamento di alcuni dei più diffusi inestetismi, come le celluliti localizzate, i difetti di circolazione, l'elasticità cutanea, l'adipe localizzato. Sono stati infatti messi in evidenza i miglioramenti dell'elasticità tegumentaria, il ripristino circolatorio metabolico, la riduzione del volume adipocitario ed edematoso.

Il compattamento del tessuto connettivo con il conseguente blocco metabolico del grasso sottocutaneo non si verifica attraverso la somministrazione di farmaci, ma grazie all'energia meccanica ed al micromassaggio, che si concentra sui primi 2 / 4 cm di profondità, dove la cellulite si trova.

L'eliminazione dei liquidi in eccesso e dei rifiuti metabolici avviene attraverso un naturale riassorbimento del sistema linfatico; le onde d'urto causano un aumento della permeabilità cutanea preparandola all'uso di gel anti-cellulite o altre sostanze rassodanti e/o drenanti.

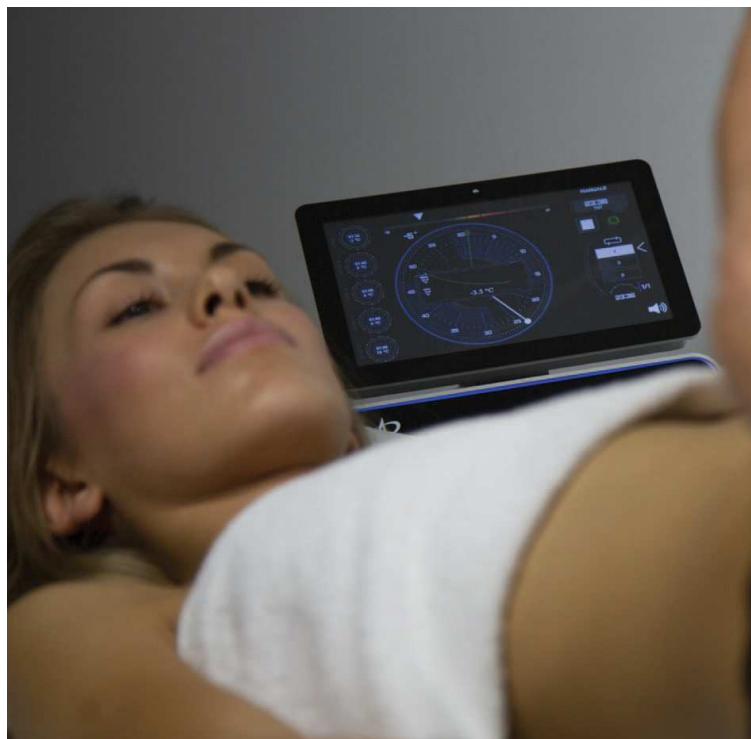

Non Invasiva SOLUZIONE TERAPEUTICA NON INVASIVA

L'utilizzo delle onde d'urto si basa sulle vibrazioni meccaniche capaci di trasmettersi sui tessuti del corpo umano come vere e proprie onde acustiche. Una delle proprietà più importanti delle onde acustiche riguarda la cavitazione, in base alla quale fenomeni di espansione e di compressione repentini finiscono per causare implosione delle cellule ed in particolare delle cellule adipose.

Il trattamento mediante onde acustiche non è solo un trattamento rivolto alla cellulite, ma è efficacemente impiegato nel trattamento dei difetti estetici della pelle, delle lassità cutanee, degli edemi di natura estetica.

L'energia meccanica viene assorbita dal tessuto e diminuisce all'aumentare della distanza dal sito di applicazione. Lo stress meccanico innesca reazioni nei tessuti che hanno un'influenza positiva su un'ampia gamma di condizioni correlate agli inestetismi.

La terapia ad onde d'urto viene utilizzata con grande successo.

Con **STARWAVE**, PAGANI offre ora un sistema che riunisce tutti i vantaggi dell'applicazione in una forma compatta, con minori costi operativi, facile da usare e da applicare con la massima flessibilità e mobilità.

Per affrontare i trattamenti estetici con successo e nel confort del paziente, il manipolo con applicatori ad assorbimento controllato garantiscono l'esecuzione di un trattamento efficace nel pieno comfort della paziente.

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz



DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz

HEALTH
High Energy Advanced Laser Therapy
Laser

H.E.A.L.T.H. LA STAR DEI LASER

High Energy Advanced Laser Therapy rappresenta il nuovo e più voluto approccio della moderna laserterapia.

Un approccio in cui potenza, lunghezza d'onda, modalità di emissione vengono considerate nel loro complesso al fine di ottenere il trasferimento ottimale ai tessuti corporei più profondi del corpo.

Produrre e trasferire un'energia in grado di trasformarsi in biostimolazione e calore è l'obiettivo principale per ottenere successo in laserterapia nel trattamento delle patologie miotendinee.

PROFONDITÀ D'AZIONE ED EFFICACIA

La terapia laser viene impiegata soprattutto nel trattamento di patologie a carico del sistema osteomiotendineo. Per interagire con questi tessuti occorre raggiungere la corretta profondità d'azione. Ma ciò non basta: una volta raggiunta la profondità d'azione dove risiede l'origine della patologia, occorre essere in grado di trasferire una dose energetica appropriata. Ecco perché i nuovi laser in tecnologia HEALTH hanno di fatto soppiantato i laser di bassa potenza e rappresentano oggi il nuovo e più efficace approccio della laserterapia per poter interagire con i tessuti biologici in grado di assorbire l'energia laser e di trasformarla in biostimolazione.

Così la laserterapia è diventata fondamentale per accelerare i processi di guarigione, attenuare il dolore cronico, ridurre gli stati infiammatori. STAR impiega le lunghezze d'onda più congeniali per raggiungere i tessuti osteomiotendinei normalmente colpiti da patologie di pertinenza fisioterapica ed ortopedica.

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz




UN PASSO AVANTI IN LASERTERAPIA

La densità di energia è in funzione della potenza e del tempo di trattamento.

Più energia viene trasferita, maggiore sarà la quantità assimilata dai tessuti del corpo umano.

La profondità d'azione e la quantità di energia trasmessa ai tessuti, è in funzione della lunghezza d'onda e della potenza utilizzata. Ma quest'ultima deve essere ben modulata ed adattata al paziente, alla zona da trattare ed alla patologia, affinché sia trasmessa la massima energia efficace, senza saturare precocemente i tessuti superficiali con potenze sovradimensionate e che da subito potrebbero scatenare un effetto termico tale da non riuscire più di fatto a proseguire il trattamento.

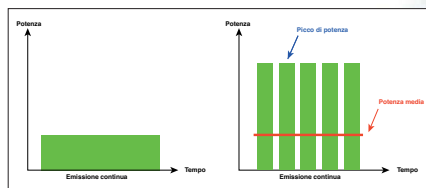


Andamento della potenza

8 MODALITÀ DI EMISSIONE

Emissione multimodale: 8 tipologie di emissione ed una svariata possibilità di combinazioni

emissione
 CONTINUA
 pulsata
 SUPERPULSATA
 customizzata
 RANDOM
 regressiva
 TIGGER POINT
 progressiva

La capacità di impostare ben 8 modalità di emissione insieme alla possibilità di combinare svariatamente le emissioni tra loro fanno dei laser STAR HEALTH i dispositivi laser più versatili ed all'avanguardia, per trattare ogni patologia nel modo più efficace possibile.

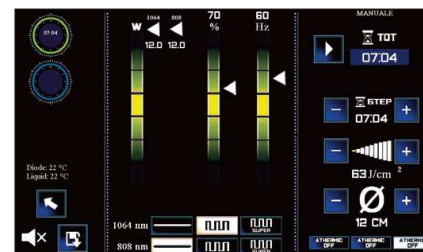


DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
 VENEZIA
 tel.0415415253
 www.righetto.biz





TUTTO GIRA INTORNO A TE

3 i passi disponibili per ciascun trattamento per combinare svariatamente tutte le 8 modalità di emissione disponibili per ottenere un trattamento perfettamente adeguato alle necessità del paziente e della patologia in atto.

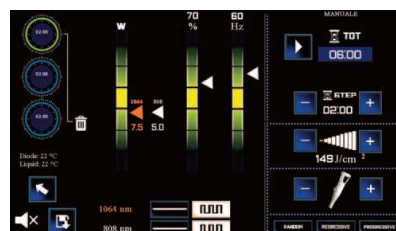


Settaggio in funzione del «fototipo», vale a dire della pigmentazione delle pelle. La luce laser viene infatti assorbita con un diverso gradiente anche in funzione del colore della pelle FIBER adatta in modo automatico la densità di energia emessa in funzione della diversa pigmentazione.




DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz


effetto ANTALGICO biostimolante ANTIINFIAMMATORIO

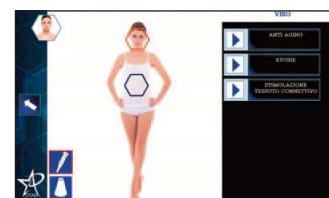

Programmi fisioterapici suddivisi in viso e corpo

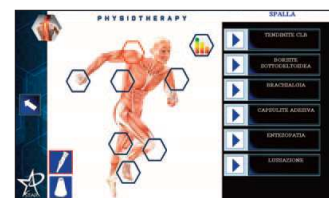

Programmi di medicina riabilitativa

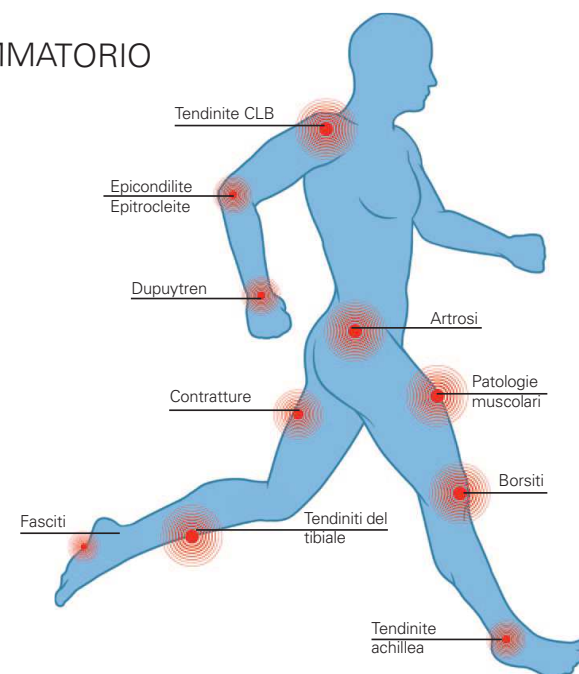

OLTRE LE TUE MIGLIORI ASPETTATIVE


Laser YAG 15 W

E' il dispositivo in grado di emettere la luce laser 1064 nm, tipo NdYAG. Si tratta di una sorgente di nuova generazione, completamente allo stato solido, capace di emettere una potenza di picco di 15 W.

La luce da 1064 nm viene inoltre combinata alla luce da 632 nm che per potenza e profondità è il supporto adeguato a trattare le patologie del dolore, acuto e cronico.

Laser Multisorgente 30 W

E' il dispositivo a 3 lunghezze d'onda in grado di coprire in modo pressoché completo lo spettro delle profondità di trattamento e di assorbimento, con una potenza totale di 30 W, è capace di erogare luci laser della lunghezza d'onda di 1064 nm (YAG), 808 nm (IR) e 632 nm. L'arma perfetta e più dotata per chi, senza alcun compromesso, desidera affacciarsi al mondo della laserterapia o per chi, già disponendo di un laser, desidera fare un decisivo salto di qualità.

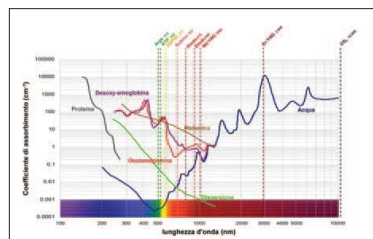

MASSIMA VERSATILITÀ DI IMPIEGO

Regolazioni indipendenti

Il laser FIBER Multisorgente, ti permette di regolare le due sorgenti di potenza (Yag e IR) in modo totalmente indipendente in modo tale da adeguare gli effetti in funzione degli obiettivi terapeutici perseguiti.


Regola il tempo o la dose

L'operatore può impostare il tempo di applicazione ed il dispositivo in modo automatico imposterà la densità di energia, ovvero, l'operatore imposterà l'energia ed il dispositivo calcolerà il tempo necessario per trasmetterla.

Trigger points

Lavorare per punti rappresenta una metodica ormai consolidata da diverso tempo che trae spunto dall'agopuntura.

In tale caso, l'operatore sceglie di trattare punto per punto in sequenza, stimolando ciascun punto e saturandolo di energia.

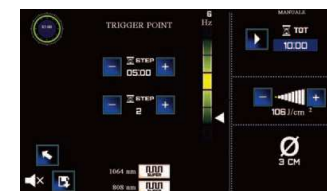

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz



Le prerogative del successo



Diffusore da 28 mm per trattamenti manuali



Diffusore da 120 mm statico



Diffusore da 60 mm per trattamenti manuali



Carrelli T A R

TRATTAMENTO MANUALE E STATICO

Invenzione di Elettronica PAGANI e acquisiti ormai dagli operatori come una opportunità, i diffusori vengono oggi ampiamente utilizzati in laserterapia per trattare zone corporee anche piuttosto ampie, senza l'ausilio dell'operatore. Il diffusore viene applicato sul braccio grazie ad un contatto magnetico e l'operatore può provvedere a posizionarlo correttamente sulla parte da trattare. A supporto della sicurezza del paziente, vi è inoltre un apposito pulsante di sicurezza che in tempo reale consente di bloccare l'emissione.

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz



DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz

H P L

HPL: LA TRADIZIONE DI SUCCESSO CONTINUA

HPL è forse il dispositivo laser a scansione più venduto al Mondo ed oggi, a fronte dell'esperienza e del successo di riscontro, si rinnova acquisendo soluzioni evolute, sia sul piano prettamente stilistico, sia sul piano tecnologico. Grande affidabilità, efficacia e praticità d'uso continuano ad essere prerogative della nuova gamma HPL.

Una scelta oculata, basata su forte tradizioni di affidabilità di marchio e di prodotto, oggi si compendiano a soluzioni tecnologiche che rendono HPL unico ed inconfondibili, destinato a dare ancora molte soddisfazioni ai suoi utilizzatori ed ai pazienti che fruiscono delle sue performances.

Attivare il naturale processo di guarigione dei tessuti e' l'effetto piu' importanti di energie e lunghezze d'onda che riescono a trasferire la luce laser in profondità'.



ALTRO TITOLO

Ogni modello HPL dispone di una sorgente laser ad alta potenza ed elevata densità di energia.

- HPL 1.6: dotato di sorgente IR 808 nm, 1.600 mW + 1 mW 650 nm

- HPL 7.0: dotato di sorgente IR 808 nm 7.000 mW + 1 mW 650 nm.

- HPL 7.0 Yag: dotato di sorgente 1064 nm 7.000 mW + 1 mW 650 nm.

La possibilità di rotazione del piano di scansione in modo del tutto automatico consente di direzionare il raggio ovunque, facilmente, per trattare ad esempio anche pazienti seduti.

HPL è tutto nuovo. Nuovo nel design, con un ampio display TOUCH-SCREEN, prettamente italiano, dove linee razionali e rigorose si combinano a linee più sinuose ed arrotondate per infondere all'intero dispositivo un aspetto moderno e sofisticato. Nuovo nei materiali, con l'utilizzo di una buona percentuale di lega di alluminio al posto del ferro per conferire leggerezza e altri componenti ecocompatibili. Nuovo nelle soluzioni di trasferimento di energia sul paziente con ottiche ancora più performanti ed efficaci. Nuovo, infine, nel software per offrire un accesso più semplice e attuale, e tecnologia 4.0 per controllo remoto ed interconnessione nel medesimo ambiente di lavoro. .

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione laser: IV

Alimentazione: 110 - 230 Vac +/- 10% 50/60 Hz

Dimensioni & peso: cm 45x60x160 h - 40 Kg

Luce visibile: 5 mW 650 nm

Emissione: continua e pulsata

Duty-cycle: 10 □ 100%

Frequenza: 10 □ 200 Hz

Rotazione del piano: - 45° / + 90°

Programmi predefiniti e 50 spazi per memorie libere

Uscita esterna indipendente per manipolo puntiforme IR 808 nm 1200 mW (a richiesta)

Accessori standard: occhiali di protezione (1), connessione inter-look, manuale



DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz

GRANTRO



DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz



GRAN TRIO

Del tutto nuovi i tre dispositivi di Ultrasuono, Elettrostimolazione e Terapia Combinata rappresenta il GRAN TRIO con cui pagani affronta anche le terapie più tradizionali. Con software Opera Design, i nuovi dispositivi offrono un approccio funzionale innovativo, un'interfaccia sofisticata ma semplice da usare, moderno nelle forme ed attuale nelle funzioni, un ampio display da 10 pollici di tipo touch-screen e soluzioni che permettono una configurazione personalizzata di ciascun dispositivo. Tutte le soluzioni esprimono un concetto utile di tecnologia, ove ogni soluzione è impiegata per rendere meglio usufruibile, più veloce, più intuitivo, più efficace ciascuno strumento. Dalle impostazioni manuali in cui l'operatore può da subito impostare parametri secondo le sue esigenze, ai programmi suggeriti con le mappe anatomiche, passando per la novità della Terapia ad Obiettivi, il cerchio è per antonomasia la figura geometrica perfetta per eccellenza. E' facile ed intuitivo muoversi, avendo sempre disponibile qualsiasi tasto e qualsiasi funzione. Ogni parametro è sotto controllo, ogni azione è intuitiva e veloce.

ELETTROTHERAPIA



DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz



Combinato ULTRASUO & ELETTROTHERAPIA con possibilità di VACUUM



Ultrasuono multifrequenza 1/3 MHz



Elettroterapia completa di BASSA e MEDIA/FREQUENZA con possibilità di VACUUM

3-BAND: L'ULTRASUONO MULTIFREQUENZA

Un concetto tutto nuovo e più efficace di intendere l'ultrasuonoterapia!

Tutto nuovo, l'ultrasuono 3-BAND è il dispositivo "Principe" tra le apparecchiature per ultrasuonoterapia di Elettronica PAGANI. Innovativo, moderno, dotato di soluzioni atte a garantire la più ampia versatilità di utilizzo e la massima efficacia grazie soprattutto alla dotazione di una tecnologia attuale e moderna che vede l'impiego delle ceramiche multifrequenza da 1 & 3 MHz.

Il nuovo 3-BAND è l'ultrasuono per eccellenza, adatto a chi sceglie di operare con la massima qualità, senza compromessi anche nell'ambito delle terapie più tradizionali e conosciute.

CAVITAZIONE IN FISIOTERAPIA E FISIOESTETICA

La cavitazione, inteso come un copioso effetto meccanico provocato dalle onde ultrasonore sul paziente, può essere utile sia in campo riabilitativo per deturpare le calcificazioni miotendinee a livello articolare, sia in campo fisioestetico per favorire la destabilizzazione delle cellule del grasso.

Specifici programmi sono disponibili per il trattamento delle calcificazioni di spalla, per i ritardi di consolidazione ossea over le onde ultrasonore di bassa intensità e tempi sufficientemente lunghi hanno dimostrato essere utili.

La cavitazione usa l'effetto meccanico/piezoelettrico proprio delle onde ultrasonore e le usa da una parte per indurre la stimolazione dell'osteogenesi, dall'altra parte come azione "distruttrice" delle cellule di grasso.



IDEATO PER FARVI RAGGIUNGERE I VOSTRI MIGLIORI OBIETTIVI



CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Frequenza: 1-3 MHz
Emissione: continua e pulsata (25%, 50%, 75%)
Modulazione: da 1 a 200 Hz
Testina 1 MHz 5 cm
Timer max. 30 min
Display: grafico a colori con Touch screen da 6,5"
Trattamenti ad obiettivi
Programmi predefiniti con mappe anatomiche
Memorie libere
Intensità max: 3 W/cm² W max
Real-time device con indicazione del corretto accoppiamento testina-tessuto
Gel 250 gr

A richiesta:

- Testina 2 cm / 3 MHz
- Carrello mod. STAR
- Carrello mod. STAR?Slim
- Borsa per trasporto

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel. 0415415253
www.righetto.biz

INFINITY: 2 CANALI INDIPENDENTI. OLTRE LE SOLITE ELETTROTERAPIE!

Saper scegliere senza rinunciare a nulla

Tens, ionoforesi, correnti diadinamiche, interferenziali verticali ed orizzontali, elettrostimolazione dei muscoli denervati e normoinnervati, INFINITY è il dispositivo per elettroterapia per anatonomia, il più eclettico, il più completo.

Elettroterapia Drenante

L'impiego di questa particolare forma d'onda di tipo esponenziale, contribuisce a migliorare la circolazione, accelera e facilita il ritorno venoso, attenua le problematiche ed il dolore derivanti da gonfiore ed edema.

Correnti IF da 2 a 20 KHz a regolazione verticale ed orizzontale

Per modalità orizzontale, si intende la possibilità di far variare la frequenza, tenendo fissa la potenza. In tal modo, verranno spazzolate nel medesimo trattamento frequenze con diverse proprietà, da antalgiche ad anti-edemigene, sino ad eccitatorie, per patologie complesse, in cui il dolore è


associato all'edema.

Unità vacuum ad emissione continua e pulsata (a richiesta)

La vacuum può essere utilizzata per eseguire trattamenti specifici come sui cheloidi, il drenaggio, ovvero costituire un utile supporto, sia pratico che terapeutico, nell'applicazione di alcune forme di elettroterapia (come le correnti interferenziali), in cui l'effetto di iperemia della depressione si associa a quelli propri delle correnti di volta in volta utilizzate.

Esame elettrodiagnostico e curva i/t (a richiesta)

Oltre alla più ampia gamma di forme d'onda, è possibile avvalersi di un software dedicato all'esame elettrodiagnostico, accurato e completo in grado di traslare i valori rilevati in dati concreti come reobase, cronassia e disegnare la curva i/t in modo del tutto automatico.

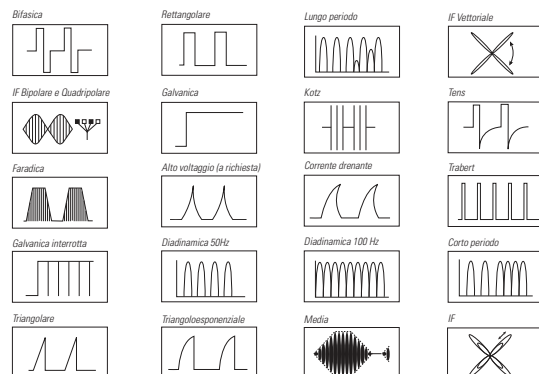

È FACILE ABITUARSI AL MEGLIO!



TONIFICAZIONE FIBRE LENTE

MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE DELLE FIBRE VELOCI

TRATTAMENTO DELLE ATROFIE DA NON USO

CAPILLARIZZAZIONE

TERAPIA ANTALGICA TENS

TERAPIA DEL DOLORE CRONICO ED ACUTO

DOLORE ED EDEMA CON CORRENTI IF E DIADINAMICHE

TRATTAMENTO DEI MUSCOLI DENERVATI

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Uscite: n. 2, indipendenti nella scelta della corrente e delle dosi

Intensità max.: 76,5 mA

Bassa frequenza

Galvanica, galvanica interrotta, diadinamiche (50-100 Hz, CP, LP, 50 Hz interrotta e 100 Hz interrotta), rettangolare, triangolare, Bifasica, Trabert, Faradiche, Drenante

Media frequenza: da 2 a 20 KHz Bipolare e quadripolare

IF bipolare, IF quadripolare, IF isoplanare, IF vettoriale di stimolazione, Kotz, IF isodinamica orizzontale

Display: Grafico a colori 480x800 pixel 6,5" TFT con Touchscreen

Programmi terapeutici predefiniti e Terapia ad Obiettivi e Memorie libere

A richiesta:


- Modulo Vacuum ad emissione continua e pulsata
- Esame elettrodiagnostico e curva i/t con calcolo automatico parametri utili (a richiesta)

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz

IL PIU' VERSATILE!

In EU sono riunite tutte le peculiarità dei più moderni generatori terapeutici di produzione PAGANI per l'elettroterapia e l'ultrasuonoterapia. Ciò fa di EU il più versatile strumento combinato per ultrasuono ed elettroterapia della nuova gamma con software Opera Design. L'ultrasuono multifrequenza 1/3 MHz si combina all'elettroterapia universale a 2 canali indipendenti, per offrire prestazioni di elevato livello qualitativo in piena versatilità terapeutica e garantire trattamenti separati con correnti elettriche od ultrasuonoterapia, ovvero combinate, associando gli effetti delle correnti e delle onde ultrasonore

nel medesimo tempo. Le correnti di bassa e di media frequenza sono erogate su due canali indipendenti sia nella corrente che nell'impostazione della dose. EU consente all'operatore di praticare qualsiasi tipo di trattamento e l'avanzato software su piattaforma Windows CE permette l'utilizzo di protocolli terapeutici con mappe anatomiche e memorie libere per l'inserimento di un vastissimo numero di programmi personalizzati. EU può essere completato (a richiesta) con modulo di unità VACUUM e software per curva I/T.

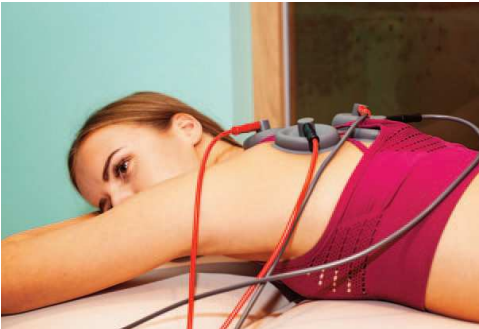

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ultrasuono	Media frequenza: da 2 a 20 KHz
Frequenza: 1/3 MHz BF / 100 ÷ 500 Hz	IF bipolare, IF quadripolare, IF isoplanare, IF vettoriale, MF di stimolazione, Kotz, IF isodinamica orizzontale
Emissione: continua e pulsata (25%, 50%, 75%, 100%)	Display: Grafico a colori 6,5" TFT
Modulazione: da 1 a 200 Hz	Programmi terapeutici predefiniti
Testina multifrequenza 5 cmq, funzionante in modo singolo o combinato	Treatment ad obiettivi
Timer max. 30 min	Memorie libere
Intensità max.: 3 W cmq	Testina 5 cmq 1/3 MHz
Real-time device con indicazione del corretto accoppiamento testina-tessuto del paziente	
Elettroterapia	A richiesta:
USCITE: n. 2 indipendenti nella corrente e nella dose	Testina 1/3 MHz 2 cmq
Intensità max.: 76,5 mA	• Software per curva I/T e calcolo automatico dei parametri di riferimento
Bassa frequenza:	• Carica STAR?Slim
Galvanica, galvanica interrotta, diadinamica (50-100 Hz, CP, LP, 50 Hz interrotta e 160 Hz interrotta), rettangolare, esponenziale, interrotta, rettangolare, esponenziale, Borsa per il trasporto	• Carica STAR?Slim
triangolare, Bifasica, Trabert, Faradiche,	

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz

LYMPHACTIVE



LYMPHACTIVE: STIMOLA IL CIRCOLO VENOSO E LINFATICO,

LYMPHACTIVE è l'unico ed esclusivo sistema brevettato per la pressoterapia dinamica, in movimento. Prima a livello mondiale, LYPHACTIVE è stata realizzata grazie all'esperienza clinica in medicina vascolare, in sinergia con le conoscenze ed il know-how del nostro team di ingegneri.

Posizione eretta in movimento

Grazie alla posizione eretta viene assicurata la postura più corretta durante l'applicazione della pressoterapia. Il trattamento è sicuro e confortevole per ciascun paziente.

Rispetto del flusso fisiologico

La posizione eretta garantisce il naturale e fisiologico flusso venoso e linfatico.



LYMPHACTIVE è l'unico ed esclusivo sistema brevettato per la pressoterapia dinamica, in movimento. Prima a livello mondiale, LYPHACTIVE è stata realizzata grazie all'esperienza clinica in medicina vascolare, in sinergia con le conoscenze ed il know-how del nostro team di ingegneri.

Esercizio attivo

La pressoterapia dinamica è l'unico trattamento di pressoterapia in grado di garantire un approccio terapeutico attivo, in cui il paziente viene fattivamente coinvolto nel trattamento, a favore del suo stesso successo.

La pressoterapia consiste in un massaggio terapeutico che aiuta a contrastare gli edemi, stimolare la circolazione, migliorare l'aspetto estetico delle parti trattate. La pressoterapia mira a rimuovere i liquidi interstiziali in eccesso ed a favorire il ritorno veno-linfatico rispettando la fisiologia del circolo e delle strutture anatomiche interessate. L'effetto drenante si ottiene solo se la pressione viene applicata in maniera da determinare un gradiente pressorio in senso disto-proximale e se si alternano fasi di compressione e fasi di rilasciamento.



DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz

1- Aumento della velocità di flusso venoso e linfatico: la pressione applicata determina riduzione del calibro dei vasi venosi e linfatici nella zona sottoposta a compressione ma anche, per lo spostamento dei fluidi, una distensione dei vasi nella zona immediatamente a valle;

2- Effetti biochimici: le forze di tensione e di stiramento determinano, come risposta fisiologica delle cellule endoteliali, il rilascio di sostanze ad azione anti-trombotica, pro-fibrinolitica e vaso-dilatatrice;

3-Effetti sull'edema: l'aumento della pressione interstiziale favorisce l'assorbimento dei fluidi interstiziali verso l'interno dei capillari linfatici iniziali, aumentando la portata linfatica iniziale.

• Flebologia

Promuove il ritorno venoso, favorendo il problema delle

masse sanguigne statiche all'interno dei vasi ectasici e sfiancati.

• Linfologia

Trova applicazione nelle stasi linfatiche e nel linfedema, nella fibrosi cutanea reattiva ed edema duro.

• Medicina estetica

Ampiamente usata nel settore estetico e le applicazioni principali riguardano, la stasi linfodermica.

• Chirurgia generale

Può essere usata nel drenaggio di zone in cui è stata danneggiata/asportata la stazione linfonodale (mastectomia) o per contrastare ematomi ed edemi post-chirurgici.

• Fisioterapia

Usata nelle patologie articolari, nelle ipotonie e nelle contratture.

Accessori ACCESSORI STAR STANDARD

Gli accessori di **S T A R** nascono dagli stessi standard che ispirano la qualità e l'accuratezza del dispositivo. Con una vasta gamma di prodotti, progettati per completare il dispositivo con praticità, eleganza, puoi essere certo di ricevere un prodotto finito e personalizzato.



Carrelli STAR SLM



Valigia/trolley



Carrelli STAR

Assistenza Avanzata CORSI DI FORMAZIONE PAGANI

S T A R farà di ogni trattamento che eseguirai un approccio nuovo ed efficace. Al fine di supportarti e di farti usare al meglio ogni tuo nuovo dispositivo, i nostri corsi di diverso livello sono realizzati per aprire un confronto e trasferirti tutte le esperienze di chi già utilizza i dispositivi.

I corsi riflettono anche i principi che guidano tutto ciò che facciamo nell'offrire, ad esempio, istruzioni personalizzate su misura a personale più o meno esperto, perché ciascun nostro Cliente sia in grado di ottenere il meglio dal dispositivo acquistato, secondo le sue specifiche prerogative.

Assistenza tecnica diretta da chi produce

In tanti anni di lavoro, abbiamo imparato a diffidare di chi propone la panacea di tutti i mali, intraprende strade troppo corte, di chi fa promesse gridate e troppo alte.

Offriamo ai nostri Clienti prodotti di qualità dotati di performance terapeutiche e tecnologiche certe e servizi di assistenza tecnica sul posto ed in laboratorio, includendo verifiche di conformità, tarature e contratti di manutenzione.







tel. +39 02 99043903
fax +39 02 99045149
info@elettronicapaganini.it
www.startinphysio.com

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz